



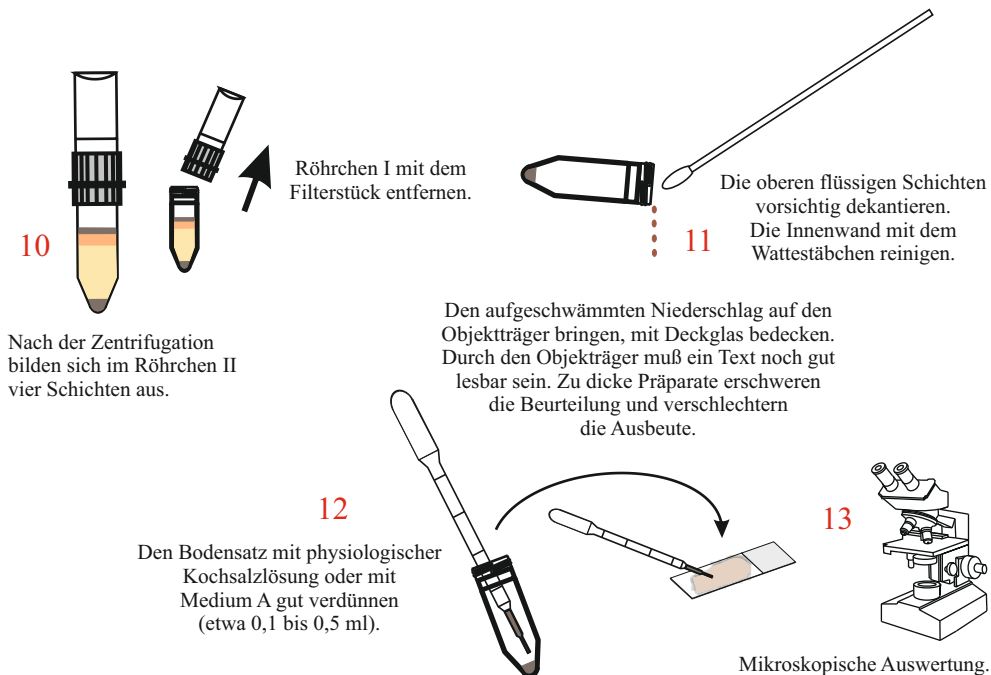

# SEDIMENTATIONSVERFAHREN MIT PARASITRAP®

## AF / SAF / ECO / BAILENGER-SYSTEM

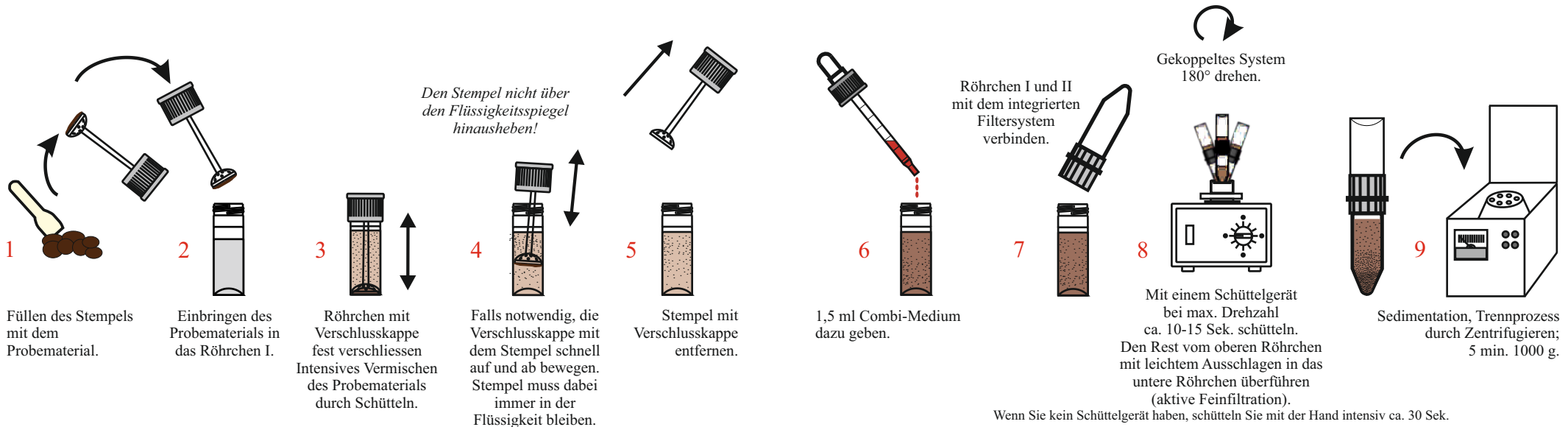

**ALLGEMEINE HINWEISE**

Verarbeitung mit kleineren Zentrifugen und Qualitäts-Kontrolle

- Gut vermischtes Material gibt bessere Ergebnisse
- Möglichst frisches Probenmaterial verwenden
- Untersuchungen aus verschiedenen Teilen des Probenmaterials, oder von verschiedenen Tagen erhöhen die Trefferquote
- Die parallele Untersuchung mit einer Flotationsmethode kann die diagnostischen Ergebnisse weiter verbessern
- Verwenden Sie Deckgläser nicht unter 24 x 36 mm (bis 24 x 60 empfohlen). Die Durchmusterung muss systematisch den gesamten Bereich erfassen

Sie entfernen vor dem Zentrifugieren das Filterstück mit dem Röhrchen I und ersetzen es mit der für das Röhrchen II separat beigelegten Verschlusskappe. Die übrigen Arbeitsschritte erfolgen, wie in den Abbildungen 9-13 dargestellt (siehe oben).